

Instruktion för kapillär provtagning via stick i fingret.

Kan även utföras i öronsnibben, detta för att minimera risken för kontaminering.



Desinficera fingret och låt torka, eller låt provlämnaren tvätta händerna noga med tvål och vatten. Viktigt att även provtagaren säkerställer rena händer och handskar. **Detta är viktigt för att förebygga ev kontaminering.**



Förbered lansetten genom att ta bort toppen på lansetten med ett vridmoment. Ta ett grepp runt fingertoppen för att den skall fyllas med blod. Stick på ena sidan av fingertoppen genom ett bestämt tryck med lansetten. Välj med fördel ring- eller långfingret då huden kan vara tjockare på pekfingret.



Torka av den första droppen blod med kompressen. Låt sedan handen hänga till dess att en ny stor bloddroppe bildas. **OBS! Pressa inte ut blod från fingret, då detta kan resultera i ett utspätt provresultat.**



Använd den röda hållaren till att greppa runt glasröret. Ni behöver två fulla rör med blod. Ett för A-prov och ett för B-prov. Totalt 2 rör.



För glasröret till fingret och håll öppningen mot blodsdroppen tills hela röret fyllts med blod (det går fort).



Ta fram ett av provrören/plasttuberna och för ned det blodfyllda glasröret däri. Stäng locket. Endast ett glasrör per provrör.



Skaka röret ordentligt, så att blodet från glasröret sprider sig i provröret. Detta är viktigt eftersom provröret innehåller ett medel som bl a förhindrar den fortsatta utvecklingen av Peth.



Klistra fast en streckkod (likadana streckkoder) på varje plasttub/provrör. Lägg sedan rören i plastpåsen och där efter i det förfrankerade labbkitet. Lägg på postlådan som vanligt.

prodia.

Kolla på film hur du tar ett prov.

