

Provtagning urin

Kitet innehåller: 2 provrör med lock och 2 förlängningsrör, box med remiss.
Du behöver också streckkodsetiketter samt urinmugg.

1. Samla in urin i en ren mugg. Följ sedan punkt A-D för att undvika manipulation:

- Skruva av det gula locket, men spara det. Sätt på förlängningsröret.
 - Dra upp pistongens bas till linjen på röret, så du har ett nästan fullt rör med urin.
 - Vänd på röret och sug in sista urindropparna innan förlängningsröret tas av.
 - Bryt av hela det uppstickande handtaget och kasta det samt förlängningsröret.
- Skruva på det lilla locket. Upprepa med nästa rör.

2. Riv av ett ark med 10 streckkodsetiketter, sätt på streckkodsetiketter:

- En på varje provrör
- En på remissen, översta högra hörnet
- Kopiera remissen för uppföljning. Ange klient-namn på den egna kopian!
- Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.

3. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.

4. Lägg ned i kartongen:

- Den förslutna plastpåsen med provrören.
- Remissen, glöm ej ange **e-postadress och kundnummer!**

Förslut kartongen och posta.

